

pH indikačné prúžky (100 ks) : pH 4,5 – 9,0

Celých 60% ľudí je prekyslených, čo je dôsledkom nevyváženej stravy, stresu, alkoholu, ale aj nikotínu. Dochádza k prekysleniu. Všetky procesy látkovej premeny sú narušené. Zistite si svoje vlastné pH-moču:

Pri manipulácii s prúžkami majte vždy suché ruky. Na testovací prúžok nechajte chvíľku pôsobiť čerstvý moč. Nechajte z prúžku odkvapkať prebytočnú tekutinu. Po 15-20 sekundách sa farba prúžku zmení. Prúžok priložte ku farebnej škále a porovnajte s farbami štvorčekov na indikačnom prúžku. Prúžky použite len jedenkrát. Skladujte ich na suchom a tmavom mieste v originálnom obale.

Vyhodnotenie hodnoty pH moču :

pH = 7 neutrálna

pH väčšia než 7,5 zásaditá

pH menšie než 6,5 kyslá

Obj.č. 01831